

Wijze van afname indicatieve cervix cytologisch onderzoek

Vooraf

Een baarmoederhalskanker uitstrijkje wordt afgenomen in het kader van medische indicatie.

Voor deze indicatieve aanvragen moet het roze aanvraagformulier worden gebruikt.

Invullen roze aanvraagformulier: (roze: PATH-003.2)

- Plak de sticker met patiëntgegevens op het formulier of vul het formulier handmatig in: naam, voorletters, geboortedatum, geboorteplaats/-land, geslacht, BSN nummer, adres, postcode/woonplaats, zorgverzekeringsnummer en zorgverzekeraar.
- Vul duidelijk de gevraagde informatie op het aanvraagformulier in.
- Vermeld duidelijk de naam van de aanvragend (behandelend) arts/specialist en AGB-code op het aanvraagformulier en geef de locatie aan: Apeldoorn, Zutphen, huisarts of andere instelling en het telefoonnummer.

Materiaal:

- Gebruik voor afname van het uitstrijkje de cervix-brush.
- Na afname de brush conform de instructies van de firma Hologic in het Thinprep doen.
NB: laat geen borsteltje achter in het potje!!
- Na het uitspoelen het potje goed dichtdraaien.
- Plak een sticker met de patiëntgegevens op het potje of schrijf de naam en de geboortedatum van de patiënt met potlood op de zijkant van het etiket van het Thinprep potje.
- Het aanvraagformulier met een elastiekje om het Thinprep potje doen.
- Het materiaal kan bij kamertemperatuur worden bewaard en verstuurd.

Endocervicale brush:

Normaliter wordt de cervix-brush gebruikt voor het maken van een uitstrijkje. Wanneer de kwaliteit van het uitstrijkje niet voldoet aan de criteria (aanwezigheid van cilinderepitheel) kan de endocervicale brush worden gebruikt.

Deze kunnen besteld worden via het bestelformulier op de homepage van de klinische pathologie of via bijgaande link [<toevoegen link naar bestelformulier>](#)