

Wijze van afname algemeen cytologisch onderzoek Klinische Pathologie

Invullen aanvraagformulier (groen: LABO-026)

- Gebruik een sticker met patiëntgegevens of vul het formulier handmatig in: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, adres, postcode/woonplaats, zorgverzekeringsnummer en zorgverzekeraar.
- Vermeld bij de klinische gegevens de vraagstelling en overige klinisch relevante informatie.
- Vermeld duidelijk de naam van de aanvrager (behandelend) arts/specialist en geef de locatie aan: Apeldoorn, Zutphen, huisarts of een andere instelling en zijn/haar telefoon-nummer.
- Vermeld afnamedatum.
- Vermeld aard materiaal en eventueel eerder verricht onderzoeksnummer, of een onderzoek elders verricht dat van belang kan zijn voor het onderzoek.
- Kruis een specifiek onderzoek aan: sputum, bronchusbrush, bronchusspoelsel, BAL, pleuravocht, ascites, urine, BWO, liquor, vagina, beenmerg, EUS/BUS, buikspoelvocht, punctie etc.

Instuurprotocollen algemene cytologie voor huisartsen en andere inzenders van buiten Gelre:

Materiaal:

- **Urine (cytologisch onderzoek)**

Het beste is een verse midstream plas afgenomen tussen 10:00 en 11:00 uur. De eerste ochtendurine bevat veel gedegenererd celmateriaal en is ongeschikt voor cytologisch onderzoek.

Urine zo spoedig mogelijk 'vers' inzenden (binnen 1 uur) naar de afdeling klinische pathologie van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn, route 200. Het aanvraagformulier met een elastiekje om het potje wikkelen.

- **Tepelvocht (cytologisch onderzoek)**

- Tweemaal een kleine druppel van het verkregen tepelvocht op twee schone, droge objectglasjes doen en op beide glasjes met potlood naam en geboortedatum van de patiënt schrijven.
- Met een ander schoon objectglasje het materiaal voorzichtig en gelijkmatig uitstrijken.

- Eén preparaat aan de lucht laten drogen en het andere preparaat fixeren (sprayen) met sitofix, indien er geen container/potje met 96% alcohol beschikbaar is. **NB:** als er maar 1 glaasje gemaakt kan worden, dit glaasje dan aan de lucht laten drogen.
- Transport: het objectglaasje verzenden in een verzendmapje (objectglashouder) en evt. het potje met daarin 1 glaasje, het **groene** aanvraagformulier eromheen wikkelen en met een elastiekje vastmaken.

Vragen?

Heeft u vragen neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Klinische Pathologie:

- Telefonisch op nummer 055 – 581 82 50
- Per mail via secretariaatklinischepathologie@gelre.nl